



KULLANIM KILAVUZU

TEKERLEKLİ SANDALYE TUVALETLİ

MODEL: RLTS-05

Respirox ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiyaç duyabileceğiniz durumlar için saklayınız.

1- Bu ürünün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren başlar. Garanti hizmetinden yararlanabilmek için, ürünün satın alındığını gösteren fatura veya fişin ibraz edilmesi gerekmektedir.

2- Aşağıda belirtilen durumlar ücretsiz garanti kapsamı dışında kalmaktadır:

- Ürünün yapısında kullanıcı tarafından değişiklik yapılması,
- Ürünün kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun kullanılmaması
- Ürünün hasar görmesi veya öngörülemez nedenlerle çizilmesi.

3- Garanti süresinin sona ermesi halinde, firmamız yalnızca ücretli (bedelli) servis ve onarım hizmeti sunabilmektedir.

4- Ürünle ilgili herhangi bir sorun, talep veya öneriniz olması durumunda, lütfen gecikmeden yetkili bayimiz veya satıcınız ile iletişime geçiniz.




Toplam Yükseklik	Toplam Genişlik	Toplam Uzunluk	Tüp Çapı	Net ağırlığı	Ağırlık kapasitesi
98.5cm	58cm	80cm	2.5cm	7.5KG	125KG



Kurulum ve Kullanım Videosu İçin
For Installation and Usage Video
Taratiniz.
Scan it.



MONTAJ KILAVUZU

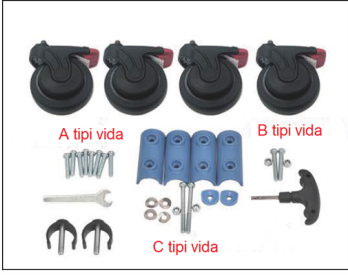

1. Çerçeve (2 adet), çapraz çubuk (2 adet), sırt dayanağı (1 adet), kol dayanakları (2 adet), pedal (1 adet), kova braketi (1 adet), kova (1 adet), tekerlekler (4 adet), mavi plastik kapaklar (4 adet),
2. A, B ve C tipi vidalar, somunlar, rondelalar, alyan anahtar, anahtar ve C şekilli düğmelerden oluşan parçaları kontrol ediniz.

3. Bir adet yan çerçeveyi alınız ve üzerine mavi plastik kapağı takarak monte ediniz.

4. Çapraz çubuğu yan çerçevelere yerleştiriniz ve alyan anahtar yardımıyla sıkınız.

5. Her iki çerçevenin plastik bağlantı parçalarını hizalayınız ve A tipi vida ile alyan anahtar kullanarak sabitleyiniz.

6. Sırt dayanağını çerçeve üzerine yerleştiriniz.



7. Kol dayanaklarını yerleştiriniz ve dairesel rondela ile birlikte C tipi vidayı takarak kilitleyiniz.


8. Kol dayanağını takarken, C tipi vidayı mavi rondelanın içine yerleştiriniz.

9. Dairesel rondela ve somunu C vidasına takınız, tornavida yardımıyla sıkınız.

10. Kol dayanağını arka kısımdaki mavi plastik bölüme yerleştiriniz. Ön taraftaki oluk ile hizalayınız ve metal pimin dışı bakmasına dikkat ediniz.

11. Kol dayanağı takıldıktan sonra, kol dayanağını sırt dayanağının oluğuna yerleştirin, ardından C şeklindeki düğmeyi takın.

12. Kol dayanaklarının doğru şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.

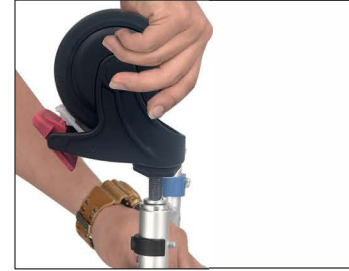

13. Sırt dayanağını çerçeveye tamamen monte ediniz.

14. B tipi vida ve somunu takınız, tornavida ve anahtar yardımıyla sıkınız.

15. Tekerlekleri takmak için çerçeveyi ters çeviriniz ve metal halkaların yerinde olduğundan emin olunuz.

16. Tekerlekleri takmadan önce kilit mekanizmalarını kapalı (kilitli) konuma getiriniz.

17. Tekerlekler ve pedallar monte edilmiştir.

18. Kova braketi çapraz çubukların üzerine yerleştiriniz.



19. Kovayı kova braketine yerleştiriniz ve koltuğu çapraz çubukların üzerine monte ediniz.

20. Montaj işlemi tamamlanmıştır.

21. Kol dayanağını çevirmeden önce kilit düğmesine basınız.

22. Kol dayanağı bu şekilde çevrilerek kullanılır.

ECE TIBBİ CİHAZLAR MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Kemal Türkler Sok. No:5/1

Avcılar/ İstanbul

Tel: 444 78 96

Web: www.ecemedikal.net /

www.respirox.com.tr

YAYIN TARİHİ: 15/12/2025